

CARSON®

Clip and Flip™

OD-12



Brillenaufstecklupe mit Klappfunktion +3,00 Dioptrien (Entspricht Vergrößerung 1,75x)

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Carson Brillenaufsteck-
Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur ric


ale

PRODUKTSPEZIFIKATION


Vergrößerung:	1,75x	Abmessungen:	11,9 cm x 3,8 cm x 6,1 cm
Dioptrien:	+3,00	Zubehör:	Schutztasche
Gewicht:	13,6 g		

BEFESTIGUNG AN DER BRILLE

1. Klemmvorrichtung an der
Brillenlupe durch
Zusammendrücken öffnen.

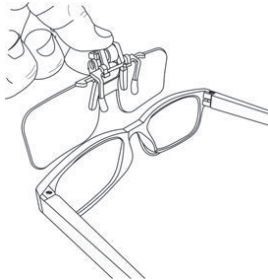

2. Klemmvorrichtung über die Brillenfassung
platzieren und loslassen.

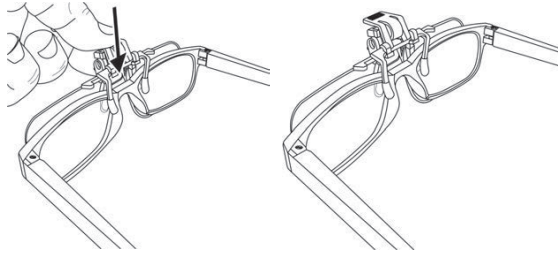


3. Wieder hochklappen, wenn
die Lupe nicht länger benötigt
wird.



REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen Sie die Linsen mit einem Mikrofasertuch.
Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemischen
Reiniger oder Lösungsmittel.
2. Um Beschädigungen zu vermeiden, Lupe in dem
im Lieferumfang enthaltenen Stoffbeutel
aufbewahren.

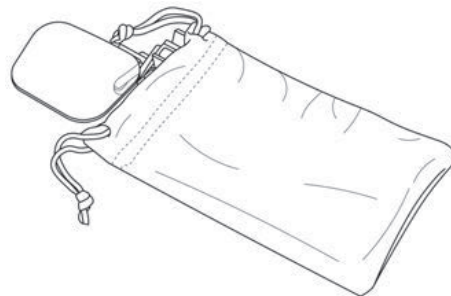

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000